

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
Производственно-конструкторское бюро «Соло»

---

**ОПОРА ДЛЯ ПОЛЗАНИЯ  
«АНГЕЛ-СОЛО»**

**ПАСПОРТ**



Новосибирск

## 1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Опора для ползания «Ангел-Соло» предназначена для детей с ограниченными физическими возможностями, ДЦП, нарушением деятельности центральной нервной системы.

Опора обеспечивает ребенку надежную поддержку и обучает важнейшему из умений – самостоятельно передвигаться.

Конструкция собрана из трубного алюминиевого профиля на самоориентирующихся колесах с ложе для ребенка.

Особенности:

- сборно-разборная конструкция;
- регулируемое по высоте и наклону ложе с равномерным распределением веса пользователя;
- четыре поворотных колеса;
- возможность изготовления конструкции по индивидуальным размерам.

Для ознакомления с техническими характеристиками, правилами безопасности и гарантийными обязательствами, внимательно прочитайте настоящий Паспорт.

## 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Опора для ползания «Ангел-Соло»;
- Паспорт;
- Инструмент для регулировки: шестигранный ключ.

## 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значения
Габаритные размеры (Д×Ш), мм *	520×540
Высота ложе от пола, мм	От 290 до 340
Диаметр колес, мм	75
Грузоподъемность, кг	До 60
Вес, кг	5

\* – стандартный габарит (возможно изготовление по индивидуальным размерам).


#### 4 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Опора предназначена для использования в помещении.
- Сборку, разборку и регулировки конструкции следует производить только взрослым.
- Во избежание несчастного случая, регулярно проверяйте надежность фиксации всех креплений.
- Никогда не используйте изделие, если какой-либо из компонентов конструкции неисправен.
- Занятия должны проходить под наблюдением взрослых.



*Не оставляйте ребенка без присмотра!*

#### 5 СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

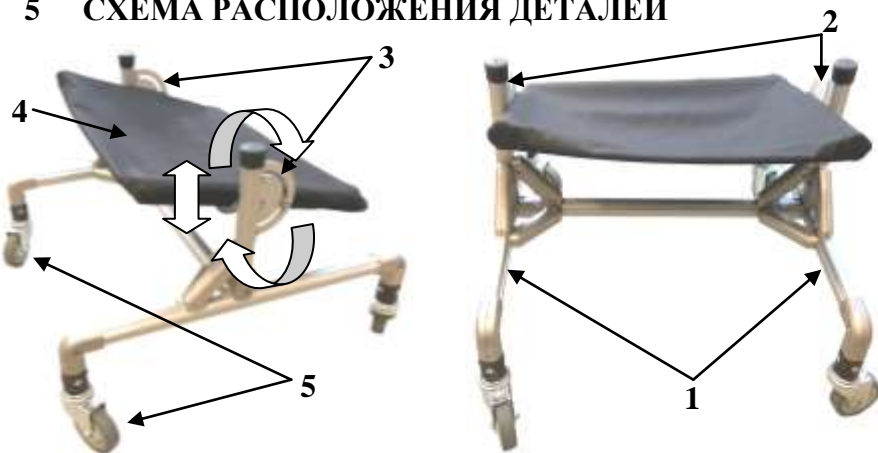

- 1 – опора на колесах (правая и левая)
- 2 – стойки (правая и левая)
- 3 – сектор (правый и левый)
- 4 – ложе
- 5 – колеса поворотные (4 шт.)

Конструкция регулируется под конкретного ребенка:

- по углу наклона ложе (ослабление винта на секторе);
- по высоте ложе (ослабление винта на стойке).

---

*Изображения в данном Паспорте могут отличаться от внешнего вида вашего изделия.*

## **6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- Опора изготовлена в соответствии с действующей технической и конструкторской документацией и признана годной к эксплуатации.

- Дата выпуска «\_\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_года.

- Подпись лиц, ответственных за приемку:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.

## **7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи.

- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока, владелец имеет право на его бесплатную замену.

- При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, штампа продавца и подписи покупателя, претензии к товару не принимаются.

- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие механические повреждения, изделия подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

**ООО ПКБ «Соло»**

Россия, г. Новосибирск, 630052, ул. Троллейная, 87/1

Тел.: 319-78-41; 8-800-22-22-816

E-mail: pkbsolo@mail.ru