



THERMOCARE *Convenience*

Настольный нагревательный модуль, обеспечивающий тепло и комфорт

Удобно, безопасно, надежно

Новорожденным требуется теплая и уютная обстановка. Особенно недоношенным детям, у которых длительная и повышенная потребность в уходе, тепле и покрове. Следовательно, зона осмотра и лечения должна быть оборудована так, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя максимально комфортно. Для достижения этой цели помогает нагревательная система линии продуктов THERMOCARE. Мягкий и теплый гелевый матрасик напоминает, по нашему мнению, ребенку о контакте с кожей родителей и обладает успокаивающим и утешительным эффектом.

Компактный дизайн нагревательного модуля позволяет размещать его на любой подходящей столешнице и легко интегрировать в места для пеленания без длительной установки.

В сочетании с обогревателем CERAMOTHERM® встроенный в рабочее место THERMOCARE Convenience обеспечивают условия окружающей среды, эквивалентные мобильному реанимационному отделению.

Комфортный токопроводящий подогрев матрасика эффективно разогревает даже гипотермических детей. Температура выбирается с шагом 0,1 °C, отображается и контролируется с помощью электроники. Аварийные сигналы будут предупреждать в случае высокой или низкой температуры, сбоя системы или сбоя питания. Отдельная цепь безопасности отключит нагрев в случае неисправности.

Технические данные THERMOCARE Convenience со встроенным электронным блоком



Размеры	715 x 600 x 40 resp. 100 мм (Д x Ш x В)
Вес	12 kg
Рабочее напряжение / источник питания	230 V~ / 50/60 Hz
Максимум. входная мощность	160 W / 0.7 A
Диапазон выбора температуры, стандарт	35 °C до 37 °C
Диапазон выбора температуры, расширенный	30 °C до 38.5 °C
Приращения выбора температуры	0.1 °C
Разрешение выбора температуры	0.1 °C
Отображение выбора температуры	От 30 °C до 38.5 °C
Отображение фактической температуры	0 °C до 50 °C
Отображение остаточного тепла	До 30 °C, затем автоматическое отключение
Отключение безопасности	При 40.5 °C
Класс защиты	1
Тип комплектного устройства	B
Тип подогрева матрасика	BF
MDD-класс	Ila

Weyer GmbH

Herrenhohe 4, D-51515 KQrten-Herweg Tel.: (+49) 02207 9698-0

Fax.: (+49) 02207 4750

E-Mail: info@weyermid.com www.weyermid.com

