






Правила ухода:

-  Стирайте компрессионное изделие только вручную
-  Температура стирки не должна превышать 30°C
-  Нельзя использовать отбеливатели, химически активные добавки
-  Запрещается гладить изделие
-  Сушите компрессионное изделие в прохладном месте, избегая нагревательных приборов

Для сохранения медицинских свойств и удаления загрязнений рекомендуется ежедневная стирка.

Для стирки рекомендуется использовать жидкое, нейтральное моющее средство.


Хранить в сухом месте при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей и влаги.


Дата производства изделия: указана на этикетке в номере партии «Lot»: последние шесть цифр обозначают год и месяц производства.

Срок годности/службы не установлен и зависит от интенсивности эксплуатации. Адрес производителя и место производства указаны на упаковке.


Соответствие стандартам: Продукция имеет Регистрационное Удостоверение Росздравнадзора РФ № РЗН 2013/928 от 29.05.2017 года. Декларация о соответствии.


Расшифровка символов, применяемых на упаковке:

 Знак соответствия. На продукцию оформлена декларация о соответствии

 Сертификация CE

 Сделано в Европе

 Соответствие международным стандартам качества

 Соответствие стандарту безопасности в текстильном производстве


Гарантийный срок:

6 месяцев на сохранение медицинских свойств (гарантия отсчитывается с момента продажи изделия).

Гарантийными случаями не являются:

- ▶ механические повреждения (включая случайные)
- ▶ повреждения, вызванные использованием товара не по назначению
- ▶ дефекты, возникшие как следствие нарушения правил и условий эксплуатации или хранения, правил ухода за изделием
- ▶ несанкционированные внесения изменений в конструкцию

Гарантия не распространяется на упаковку.

 Обратитесь к инструкции по применению

 Можно утилизировать вместе с бытовыми отходами

 Не содержит латекс

 Производитель

 Модель

 Код партии

www.bwell-swiss.ch

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

B.Well 
rehab

Изделия медицинские компрессионные:

Гольфы JW-121 • Чулки JW-222 • Колготки JW-321

Серия MED: современный метод лечения отеков

Компрессионный трикотаж B.Well rehab серии MED предназначен для улучшения венозного оттока при заболеваниях вен.

Механизм действия компрессионного трикотажа основан на распределенном давлении: максимальное давление в области щиколотки 22-32 мм рт. ст. уменьшается в области голени, в области бедер компрессия минимальна.

Благодаря воздействию трикотажа на поверхностные вены:

- ▶ улучшается работа венозных клапанов
- ▶ перераспределяется кровоток в глубокие вены
- ▶ улучшается отток крови снизу-вверх

Все изделия проходят проверку на медицинскую эффективность согласно Британскому стандарту BS 6612.

Особенности:

- ▶ анатомическая вязка «объемными сотами» позволяет достичь комфортного прилегания изделия и правильного распределения давления по ноге
- ▶ комплексные нити с двойной S-образной оплеткой придают изделиям эластичность и необходимый компрессионный эффект
- ▶ особое плетение на стопе обладает массажным эффектом, уменьшает усталость и стимулирует кровообращение стопы
- ▶ усиленные носок и пятка уменьшают риск случайных повреждений
- ▶ тонкий и прозрачный трикотаж приятно носить даже в теплое время года

Показания (II class · 22-32 мм рт. ст.):

- ▶ хроническая венозная недостаточность
- ▶ выраженные отеки ног
- ▶ расширенные поверхностные вены и наличие варикозных узлов
- ▶ множественные сосудистые звездочки
- ▶ подготовка и восстановление после оперативных вмешательств
- ▶ профилактика тромбоза глубоких вен

Противопоказания:

- ▶ септическое заболевание вен и мягких тканей
- ▶ сердечно-легочная недостаточность
- ▶ трофические язвы нижних конечностей

IM_JW_MED_3_RU_A6_4217



⚠ Предупреждения

Перед покупкой компрессионного трикотажа II класса рекомендуется консультация врача. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть аллергическая предрасположенность к компонентам, входящим в состав материала.

Порядок надевания:

Рекомендуется надевать компрессионный трикотаж утром до появления отеков. Прежде чем приступить к надеванию изделия, проверьте, чтобы ваши руки были подготовлены: отсутствие колец на пальцах, аккуратно подстриженные ногти, отсутствие заусенцев.

1. Соберите изделие до пятки. Аккуратно натяните на ступню. Проверьте правильность расположения пятки.



2. Постепенно надевайте трикотажное изделие разглаживающими движениями



3. Аккуратно уберите складки при необходимости



4. Натяните изделие до талии (в том случае, если это колготки)



Режим ношения:

Для профилактики отеков следует носить компрессионный трикотаж в течение дня, если иное не рекомендовано врачом.

Если Вы снимаете изделие в течение дня, рекомендуется надевать его снова после 10-15 минутного отдыха ног в приподнятом положении.

Комплектность:

- ▶ гольфы – 1 пара в упаковке, инструкция
- ▶ чулки – 1 пара в упаковке, инструкция
- ▶ колготки – 1 штука в упаковке, инструкция

Правила подбора:

Чтобы облегчить и упростить подбор необходимого размера трикотажа специалисты V.Well Swiss рекомендуют пользоваться росто-весовой таблицей.



Компрессионный трикотаж V.Well rehab также можно подобрать, используя таблицу, основанную на индивидуальных измерениях.

Такие измерения лучше проводить с утра, до появления отеков.

Таблица измерений для подбора размеров колготок, чулок, гольфов

Измерение, сантиметры	Размер ступни	Окружность самой узкой части голени над лодыжками	Окружность голени в самом широком месте	Окружность бедра на 5 см ниже ягодичной складки	Окружность талии	Длина от пола до ягодичной складки	Измерения на фигуре	
							t	G
РАЗМЕР	a	b	c	g	t	A-G		
1	до 23	19-21	29-34	47-55	до 65	69-72		
2	23-24	21-23	32-37	52-62	60-78	71-75		
3	24-26	23-25	35-41	57-66	70-90	73-78		
4	26-27	25-28	39-45	60-70	75-110	76-81		
5	от 27	от 28	от 42	от 65	от 90	78-83		

Для колготок существуют ограничения по окружности талии (t):

1-3 размеры – до 90 см; **4-5 размеры** – до 110 см.

Состав:

Наименование изделия	Класс компрессии	Состав
Изделия медицинские компрессионные: Гольфы JW-121	II class, 22-32 мм рт. ст.	74% Полиамид 26 % Эластан
Изделия медицинские компрессионные: Чулки JW-222*		74% Полиамид 26 % Эластан
Изделия медицинские компрессионные: Колготки JW-321		74% Полиамид 26 % Эластан

* содержит силикон